

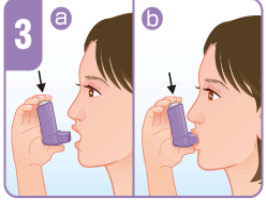

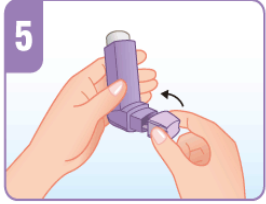



《吸入評価表》

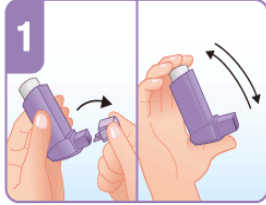

<p>ディスクス(薬剤名:)</p>	
<p>カバーとレバーをカチリと音がするまで開ける。</p>	
<p>ディスクスを水平に保つ。</p>	
<p>十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。 (吸入口に息を吹きかけない)</p>	
<p>ストローで水を吸うように、早く深く吸い込む。</p>	
<p>苦しくない程度に息止めをする。</p>	
<p>ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。</p>	
<p>「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」のうがいを2回行う。</p>	

《吸入評価表》

 <p>1</p>	<p>MDI (薬剤名:)</p>	
 <p>2</p>	<p>キャップを外し、よく振る。</p>	
 <p>3 a b</p>	<p>十分に息を吐く。</p> <p>(指三本程度離し・くわえ)て、ゆっくり息を吸い込みながらポンベの底を強く押す。 同調できる。</p>	
 <p>4</p>	<p>苦しくない程度に息止めをする。</p>	
 <p>5</p>	<p>ゆっくり息を吐き出し、キャップを閉める。</p>	
 <p>6</p>	<p>「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」のうがいを2回行う。</p>	


《吸入評価表》

エアロチャンバー

(薬剤名:)




MDIのキャップを外し、よく振る。

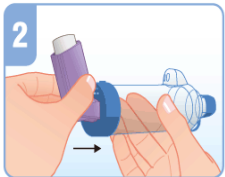

MDIのアダプターと接続部をはめ込む。


キャップを外し、十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。
(マスクタイプは不要)

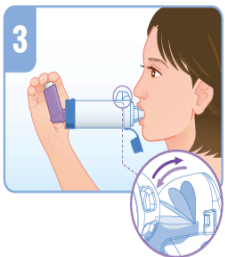

MDIのポンベの底を強く押し、
ゆっくり息を吸う。
(フローインジケーターが動くことを
確認する。)
(マスクタイプは3～5回呼吸を繰り返す。)



苦しくない程度に息止めをする。

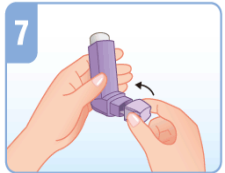

ゆっくり息を吐き出し、キャップをつける。



「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の
うがいを2回行う。

《吸入評価表》

ツイストヘラー

吸入器を立てた状態にして、
ふたをはずす。


十分に息を吐いてからマウスピースを
くわえる。
(吸入口に息を吹きかけない)

強く深く吸入する。

苦しくない程度に息止めをする。

ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。




「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の
うがいを2回行う。

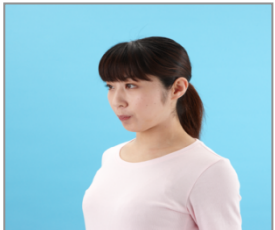

《吸入評価表》

	タービュヘイラー(薬剤名:)	
	吸入器を立てた状態にして、ふたをはずす。	
	白い部分をひねって戻す。	
	カチッという音を確認する。	
	十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。 (吸入口に息を吹きかけない)	
	強く深く吸入する。	
	苦しくない程度に息止めをする。	
	ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。	
	「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」のうがいを2回行う。	

《吸入評価表》

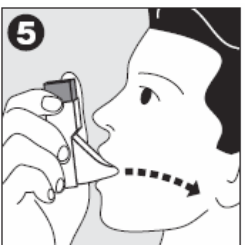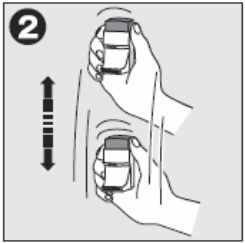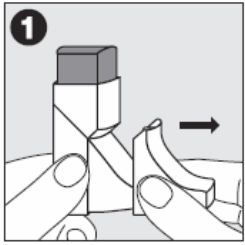

<p>クリックヘラー</p>	
<p>キャップを外し、よく振る。</p>	
<p>水色の部分を下向きに強く押す。</p>	
<p>十分に息を吐く。</p>	
<p>強く深く吸入する</p>	
<p>苦しくない程度に息止めをする。</p>	
<p>ゆっくり息を吐き出し、キャップを閉める。</p>	
<p>「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」のうがいを2回行う。</p>	

《吸入評価表》

ハンディヘラー(薬剤名)



キャップを完全に開け、内部にあるマウスピースを開ける。



吸入の直前に1カプセルだけブリスターから取り出し、カプセル充填部に挿入する。



マウスピースをカチッと音がするまでしっかり閉める。



マウスピースを上向きにして、側面のボタンを確実に一度だけ押してからはなす。



十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。
(吸入口に息を吹きかけない)



強く深く吸入する。

苦しくない程度に息止めをする。

ハンディヘラーを口からはなし、ゆっくり息を吐き出す。もう一度吸入する。



再びマウスピースを開ける。カプセル充填部の穴を下にして、使い終わったカプセルを捨てる。

マウスピース及びキャップを閉める。

《吸入評価表》



レスピマット(薬剤名:)	
キャップを閉じた状態で上向きにして持つ。	
透明ケースを矢印の方向にカチッと音がするまで回転させる。	
キャップを完全に開ける。	
息をゆっくり、最後まで吐き出す。	
マウスピースをしっかりと口にくわせる。	
息を口からゆっくりと深く吸いながら、噴霧ボタンを押す。	
できるだけゆっくり大きく息を吸い込む。	
苦しくならない程度の間息を止める。	
もう一度繰り返す(1日1回(2吸入))。	
キャップは閉じておく。	

《吸入評価表》

ブリーズヘラー(薬剤名:)

キャップを外し、マウスピースを開ける。

アルミシートから取り出した1カプセルをカプセル充填部に入れる。

マウスピースを「カチッ」と音がするまでしっかりと閉じる。

吸入器を上に向けて持ち、両側の青いボタンを「カチッ」と音がするまで同時に押してから離す。

十分に息を吐いてからマウスピースをくわえる。(吸入口に息を吹きかけない)






強く深く吸入する。「カラカラ」音が聞こえる)

苦しくない程度に息を止める。

マウスピースを口からはなし、ゆっくり息を吐き出す。







マウスピースを開き、本体を横に倒して空のカプセルを捨てる。

マウスピースを閉じてキャップを元に戻す。

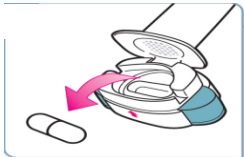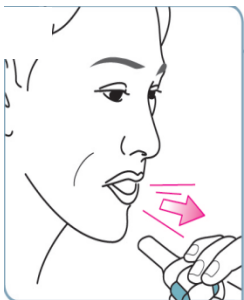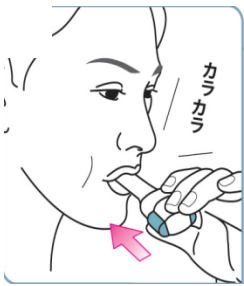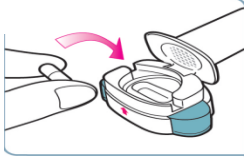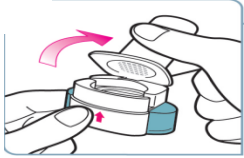

《吸入評価表》

<p>ジェヌエア(薬剤名:)</p>	<p>キャップ両側の矢印を押して引っ張り、外します。</p>
<p>吸入器本体の正面カウンターが赤色になっていることを確認します。 (吸入前の状態)</p>	<p>吸入器本体のボタンを下までしっかりと押して、離します。</p>
<p>吸入器本体の正面カウンターが緑色になっていること確認します。 (吸入準備ができた状態)</p>	<p>十分に息を吐いてから、吸入口を軽くかんで唇で包むように深くわえます。</p>
<p>強く、深く吸い込みます。「カチ」という音を確認するまで吸い込みます)</p>	<p>苦しくない程度に息を止める。</p>
<p>マウスピースを口からはなし、ゆっくり息を吐き出す。</p>	<p>吸入器本体の正面カウンターが赤色になっていることを確認します。 (吸入できた状態)</p>
<p>マウスピースを閉じてキャップを元に戻す。</p>	

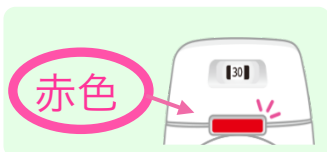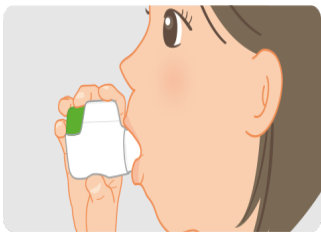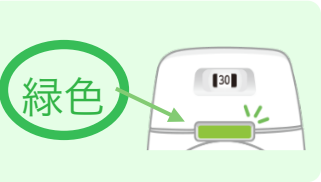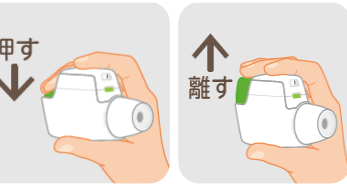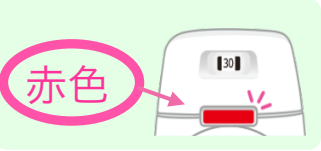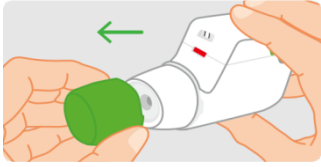

《吸入評価表》



<p>エリプタ(薬剤名:)</p>	
<p>カバーをカチッと音がるまで開ける。</p>	
<p>十分に息を吐いてから マウスピースをくわえる。 (吸入口に息を吹きかけない)</p>	
<p>強く深く吸い込む。</p>	
<p>苦しくない程度に息止めをする。</p>	
<p>ゆっくり息を吐き出し、カバーを閉じる。</p>	
<p>「ぐじゅぐじゅ」と「ガラガラ」の うがいを2回行う。</p>	